

orvosi
pecsét

Mintavételi eszközök és jelölésük	Preanalitikai teendők és jelölésük:	Preanalitika útmutató Triptáz - hiszsejst aktiváció igazolása esetén:
Szűrőcső géles 8 ml, piros kupak	H Vértvélet követően 30-60 perc elteltével a mintát centrifugálni 1500-3000 g-n 5-10 percig.	1 - Az első vértvélet a feltételezett anafilaxiás reakció kezdetétől számított 15 perc után , és legfeljebb 3 órával után kivételhez.
Li-heparin cső 6ml, zöld kupak	Mintavétel követően hűtve (2-8°C) kell tárolni.	2 - Második vértvélet: 24-48 órával, jellemzően az összes klinikai tünet teljes megszűnése után (alap triptáz koncentráció érték megállapítása).
	Aznap vizsgálat: a mintavételi napján meg kell érkeznie a laboratóriumba!	3 - Preanalitika útmutató merkapántok és tióeterek, títánérzékenység vizsgálathoz:
	Centrifugálás nélkül szobahőn (15-25 °C) kell tárolni.	A laborral történt előzetes egyeztetés után CSAK KEDDI napokon kúldhető!

A megrendelést a laboratórium felé minden esetben fel kell adni elektronikus úton!
(online vagy webes felületen: <https://labs.tritonlabs.hu>)